

Faver[®]

*juntos seremos
imprescindibles*

KIT RECUPERADOR DE IMPLANTES PERDIDOS POR TORNILOS FRACTURADOS




KIT RECUPERADOR DE IMPLANTES PERDIDOS POR CAUSA DE TORNILLOS FRACTURADOS

Sistema patentado en el sector de la implantología y la implantoprótesis.

Somos un equipo de profesionales de la implantoprótesis que trabajamos para encontrar soluciones para el día a día en su clínica.

Hemos diseñado Faver[®], una innovadora idea para poder recuperar esos implantes con un tornillo roto en su interior y como consecuencia poder solucionar los problemas que ello conlleva.

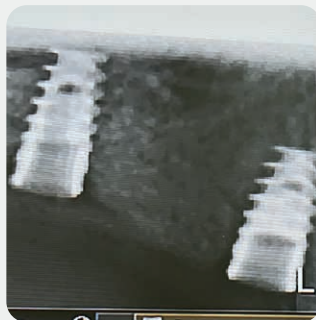

Sabemos que el éxito de sus tratamientos es su prioridad, por eso hemos diseñado un kit especializado para la recuperación de esos implantes dentales con un tornillo roto en su interior, una solución completa y práctica que permita realizar esos procedimientos de manera controlada y eficaz.

¿Que incluye Faver®?

-  **Fresas de precisión.** Diseñadas para garantizar un desgaste del tornillo controlado.
-  **Llaves quirúrgicas.** Herramientas adaptadas para la extracción de tornillos rotos.
-  **Guías quirúrgicas.** Optimiza la estabilidad durante el procedimiento para minimizar riesgos y maximizar el éxito.
-  **Manual de uso detallado.** Con instrucciones claras para que pueda utilizar este kit desde el primer día.

Ventajas para su práctica odontológica



Seguridad y Eficiencia

Reduce el riesgo de complicaciones durante la extracción de los tornillos rotos



Versatilidad

Compatible con todos los sistemas e implantes más utilizados en el mercado



Apoyo Técnico

Nuestro equipo está disponible para responder todas sus dudas y ofrecer soporte en todo momento



Éxito 98%

Todos los componentes del Faver están fabricados con materiales de la máxima calidad

Faver®

KIT RECUPERADOR DE IMPLANTES PERDIDOS

PRECAUCIONES

Asegúrese que la fresa se encuentre bien colocada en el contraángulo y el Faver este sujeto al posicionador antes de introducirlo en la boca del paciente.

INSTRUCCIONES DE USO

1-Introducir la sonda calibrada en el implante para ver la profundidad en la que se encuentra el tornillo, para a continuación seleccionar la altura del Faver correspondiente.
2-Insertamos el posicionador y sujetamos el Faver seleccionado, a continuación pondremos la fresa en el contraángulo e introducimos el posicionador en la base del implante hasta que el Faver quede totalmente sujeto al implante con el tornillo roto.

3-Seleccionaremos el contraángulo a unas 6000 revoluciones por minuto y a continuación introduciremos la fresa por el orificio del Faver presionando en toques cortos no mas de 3 segundos.

4- Después de realizar esta operación unas 3 o 4 veces, se recomienda realizar una radiografía al paciente para ver el estado del tornillo roto y así asegurarnos cómo se encuentra el interior del implante.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

El producto no se suministra estéril, por lo que deberá ser desinfectado antes del primer uso.

Lave, desinfecte y/o esterilice los componetes del Faver despues de cada uso.

COMENTARIOS DE PROFESIONALES

Dr. José Manuel González Guillén
Clínica Ceox
N.º Col. 1042

"Hemos probado el sistema Faver para extracción de tornillos rotos y podemos decir que es excepcional y de fácil manejo. Donde otros sistemas no dan resultados, el Faver lo consigue. Lo recomiendo 100%."

Dr. Pedro Manuel Redondo Chamorro
Clínica Carlos Pedrol
N.º Col. 28011468

"Utilicé el sistema Faver para la extracción de tornillos fracturados y la verdad que la experiencia fue excepcional, fácil de utilizar y con un resultado satisfactorio tanto para el doctor como para el paciente. 100% recomendable."

Dr. Jesús García Melchor
Clínica Clident
N.º Col. 437

"Las veces que he probado este sistema ha sido efectivo, así que opino que es muy recomendable."

Dr. Federico Gerona
Clínica Los Ángeles
N.º Col. 254

"Muy sencillo de utilizar y es una gran solución para resolver el problema que tenemos con los tornillos rotos de los implantes."

Dra. Ana María Manso Mora
Clínica Dental Provincial
N.º Col. 05011435

"Desde nuestra clínica queremos exponer que, tras probar el sistema Faver para extracción de tornillos fracturados, podemos asegurar que es fácil de utilizar y de gran utilidad. Dado que donde otros sistemas no han proporcionado resultados, el Faver los ha obtenido de manera excepcional, por lo que desde nuestra clínica lo recomendamos."

Dr. Juan Carlos Díaz
Clínica Centro Odontológico
N.º Col. 10035

"En mi caso era un paciente especial, con temas de cáncer, quimioterapia, etc. Ya no se puede implantar nuevamente y me llegó con tres implantes y sobredentadura superior, de los cuales dos implantes tenían tornillos rotos. Gracias al Faver, pudimos solucionar el problema sacando los dos tornillos y dejando colocados los Locator.."





Grupo FexDental®



CE

2025