



*juntos seremos imprescindibles*

KIT RECUPERADOR  
DE IMPLANTES PERDIDOS POR TORNILOS FRACTURADOS

## PRECAUCIONES

Asegúrese que la fresa se encuentre bien colocada en el contraángulo y el Faver esté sujeto al posicionador antes de introducirlo en la boca del paciente.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Introducir la sonda calibrada en el implante para ver la profundidad en la que se encuentra el tornillo, para a continuación seleccionar la altura del Faver correspondiente.
2. Insertamos el posicionador y sujetamos el Faver seleccionado, a continuación pondremos la fresa en el contraángulo e introducimos el posicionador en la base del implante hasta que el Faver quede totalmente sujeto al implante con el tornillo roto.
3. Seleccionaremos el contraángulo a unas 6000 revoluciones por minuto y a continuación introduciremos la fresa por el orificio del faver presionando en toques cortos no más de 3 segundos.
4. Después de realizar esta operación unas 3 o 4 veces, se recomienda realizar una radiografía al paciente para ver el estado del tornillo roto y así asegurarnos cómo se encuentra el interior del implante.

## LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

El producto no se suministra estéril, por lo que deberá ser desinfectado antes del primer uso.

Lave, desinfecte y/ o esterilice los componentes del Faver después de cada uso.

## IMPORTANTE

### ***Política de devoluciones***

Por tratarse de un producto sanitario reutilizable y no estéril, que puede ser manipulado y usado en intervenciones clínicas:

**No se aceptan devoluciones una vez el producto ha sido abierto o utilizado**, salvo en los siguientes casos contemplados por ley: Las devoluciones por conveniencia o uso puntual **no están permitidas**, conforme a la legislación vigente aplicable a productos sanitarios entregados por venta a distancia.

**1- Producto defectuoso de origen:** En caso de fallo de fabricación, deberá notificarse en un plazo máximo de **15 días naturales** desde la recepción.

**2- Error en el envío:** Si el contenido del pedido no corresponde con el producto solicitado, gestionaremos el reemplazo sin coste adicional.

Para que una devolución sea aceptada:

El producto debe estar **sin uso**, en su estado original y con todos sus componentes completos y en perfecto estado.

No se aceptarán devoluciones de productos usados, manipulados, incompletos o con signos de intervención clínica.

## **Soporte Técnico y Devoluciones**

Téfonos: 670 71 35 45 | 661 52 26 54

Email: [hola@faver.es](mailto:hola@faver.es)

HorizonteHace Grupo FexDental

